

VACUSTYLER

Vacustyler je klinicky testovaný přístroj, který je špičkou mezi přístroji na lymfatickou drenáž. Během procedury dochází ke střídání fází podtlaku a tlaku. Fáze podtlaku způsobí maximální prokrvení dolních končetin a fáze tlaku vede ke stimulaci aktivity lymfatického systému.

O přístroji Vacustyler



Sedavé zaměsnání, nedostatek pohybu, nedodržování pitného režimu a stravovací režim - to vše má vliv na funkci lymfatického systému.

„Ošetření přístrojem vacustyler je příjemná relaxace a trvá třicet minut“

Kromě efektivního ošetření celulitidy se Vacustyler úspěšně používá při následujících indikacích: oteklé dolní končetiny, poruchy prokrvení, poúrazové stavy, studené nohy, bolestí nohou po celodenním sezení nebo stání.

Účinky ošetření přístrojem Vacustyler



- Lymfatická drenáž
- Odvod zplodin metabolismu, detoxikace
- Odstranění celulitidy
- Prevence křečových žil
- Prokrvení dolních končetin, podpora tzv. „cévní gymnastiky“
- Regenerace ochablého vaziva
- Redukce objemu na stehnech, bocích a břichu

Jaký je ideální počet návštěv a délka ošetření ?



- Kúra 10 - 15 procedur garantuje nejlepší výsledky
- Udržovací kúra: jednou za dva týdny až měsíc
- Doporučujeme délku ošetření 30 minut
- Ze začátku doporučujeme návštěvu 2 - 3x týdně pro aktivaci lymfatického systému, pro udržovací efekt je vhodné cca 1 - 2x měsíčně

PROGRAMY VACUSTYLER

1	norm. zdraví lidé (Id., zpev., celulita)	9	7	5 minut	25 mBar
		10	8	10 minut	34 mBar
		10	8	12 minut	42 mBar
2	norm. křeč. žíly (otoky, zpev., kř. žíly)	9	9	3 minuty	35 mBar
		9	7	5 minut	20 mBar
		10	8	8 minut	26 mBar
		10	9	14 minut	31 mBar
		9	9	3 minuty	25 mBar
		9	7	3 minuty	26 mBar
3	ZPEVNĚNÍ (ml. lidé, dobrá kondice)	9	7	3 minuty	26 mBar
		10	7	5 minut	36-38 mBar
		10	7	17 minut	47 mBar
		15	7	5 minut	40 mBar
		9	5	5 minut	25 mBar
		9	6	10 minut	32 mBar
4	Vys. tlak, ucpané cévy, starší lidé	12	7	10 minut	40 mBar
		9	5	5 minut	35 mBar
		9	5	5 minut	15 mBar
5	Šetrný	6	7	5 minut	15 mBar
		7	7	5 minut	24 mBar
		8	7	17 minut	30 mBar
		5	8	3 minuty	33 mBar
		9	7	5 minut	23 mBar
		9	7	10 minut	30 mBar
6	ANEURISMA (povrch. křeč. žíly)	9	7	10 minut	30 mBar
		9	9	10 minut	33 mBar
		7	9	15 minut	38 mBar
7	DIABETES	7	7	7 minut	27 mBar
		10	8	13 minut	35 mBar
		12	10	15 minut	45 mBar
		10	9	5 minut	35 mBar
		5	7	4 minuty	23 mBar
		7	8	16 minut	33 mBar
8	Potrombozní stavy	8	9	10 minut	33 mBar
		8	9	10 minut	30 mBar
		8	9	10 minut	30 mBar